



HOE GEBRUIK JE SPEAKABOO?


Zodra u Speakaboo geopend heeft kunt u de gegevens van de eerste cliënt invoeren.

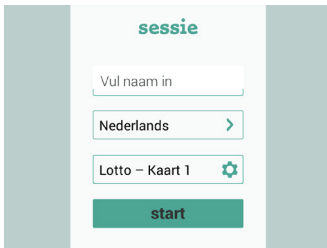

Typ de naam van de cliënt in het betreffende vakje. Gebruik > om de taal, en om spelletje te kiezen.

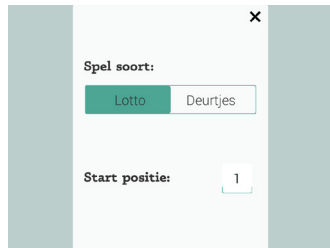


Gebruik het tekstvak onderaan om te kiezen bij welk item u wilt beginnen. Kies dan 'X' en vervolgens 'start' om te beginnen.

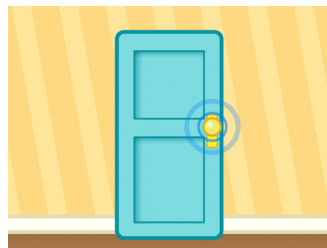


Laat uw cliënt op het deurtje of doosje tikken of (...)



(...) een foto slepen naar de identieke foto om de geluidsopname te starten.

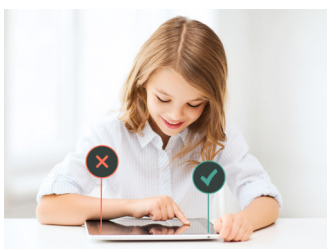


Gebruik de linker en rechter bovenhoeken om een bestand te bewaren, en te scoren. Door tikken op de rechterbovenhoek scoort u 'goed', de linker bovenhoek 'fout'.

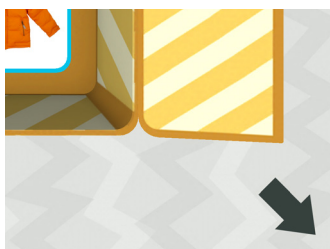


Als u tijdens een afname wilt switchen tussen de spelletjes, druk dan 3 seconden op de rechter benedenhoek.




U kunt op ieder moment stoppen, en naar het startmenu gaan, door op de linker benedenhoek te drukken.

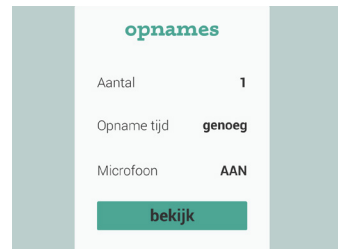


U vindt de opgenomen sessie in het startmenu onder 'opnames'.

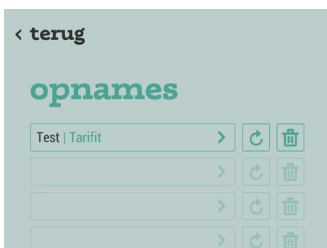


Om door te gaan met een opgenomen sessie gebruik U. Gebruik om een bestand te verwijderen. Via > komt u bij de resultaten van een cliënt.

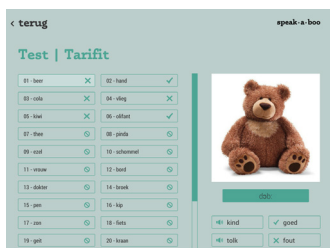

Raak een woord aan om de opname van dat item te horen. Er verschijnt dan extra informatie in de rechter kolom.

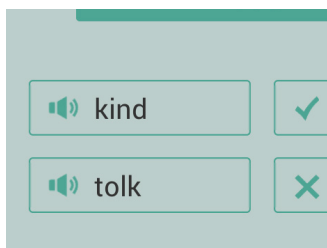

Tik op 'kind' en 'tolk' om de uitspraak van het kind met die van de tolk te vergelijken.

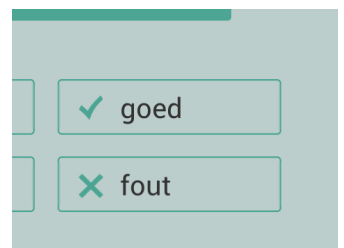

De knoppen '✓' en '✗' kunt u gebruiken om een score aan te passen.

BEST PRACTICE VOOR DE GELUIDSOPNAME.



Controleer regelmatig of u nog genoeg opslagruimte heeft in de iPad. Onvoldoende ruimte kan er voor zorgen dat er plotseling niet meer wordt opgenomen.



Zorg er voor dat of er geen stof of ander vuil in de microfoon zit.



Let op dat er niets in de weg zit van de microfoon. Verwijder zo nodig de beschermhoes.



Zorg er voor dat de cliënt de iPad tijdens de test niet te dicht bij de microfoon vast houdt.